

Construyendo Bienestar: Guía Oficial de Montaje Silla Bailey

Soluciones reales y diseño veterinario para el Megaesófago Canino.



El Reto del Megaesófago

Early Detection Board



Regurgitación frecuente
(alimento o agua no digerida).



Pérdida de peso
(incluso con mucho apetito).



Dificultad para tragar
(disfagia).



Problemas respiratorios
(tos, secreciones).

La Promesa Mega-Dog



“El megaesófago no tiene cura definitiva, pero con los cuidados adecuados y la Silla Bailey, tu perro puede recuperar su calidad de vida. No estás solo.”



Anatomía de la Silla Bailey



Habitáculo Ergonómico:

Diseño asesorado por veterinarios para mantener la postura ideal durante y después de comer.



Acolchado de Confort:

Paneles de descanso (asiento y respaldo) fijados con velcro.



Comedero Ajustable:

Sistema de riel que crece con tu perro y previene el volcado.



Cierre de Seguridad:

Mecanismo lateral para mantener al perro seguro en su posición.

El Taller: Inventario y Preparación

Piezas de Madera



11 piezas de madera mecanizada y 2 paneles acolchados.

Herramientas Necesarias



Martillo

Destornillador
Eléctrico
(para estructura)

Destornillador
Manual
(para precisión)

Matriz de Herrajes: Usa la pieza correcta

Tirafondos Grandes



Uso: Estructura principal y base.

Tirafondos Medios



Uso: Bisagras.

Tirafondos Pequeños



Uso: Cierre de seguridad.

Tubillones



Uso: Ensamblaje inicial y topes.

Pasadores




Uso: Unión de la puerta.

Fase 1: Preparación de la Madera



Inicia el montaje introduciendo los tubillones (tacos de madera) en todos los orificios marcados con un punto negro. Ayúdate suavemente con el martillo si es necesario.

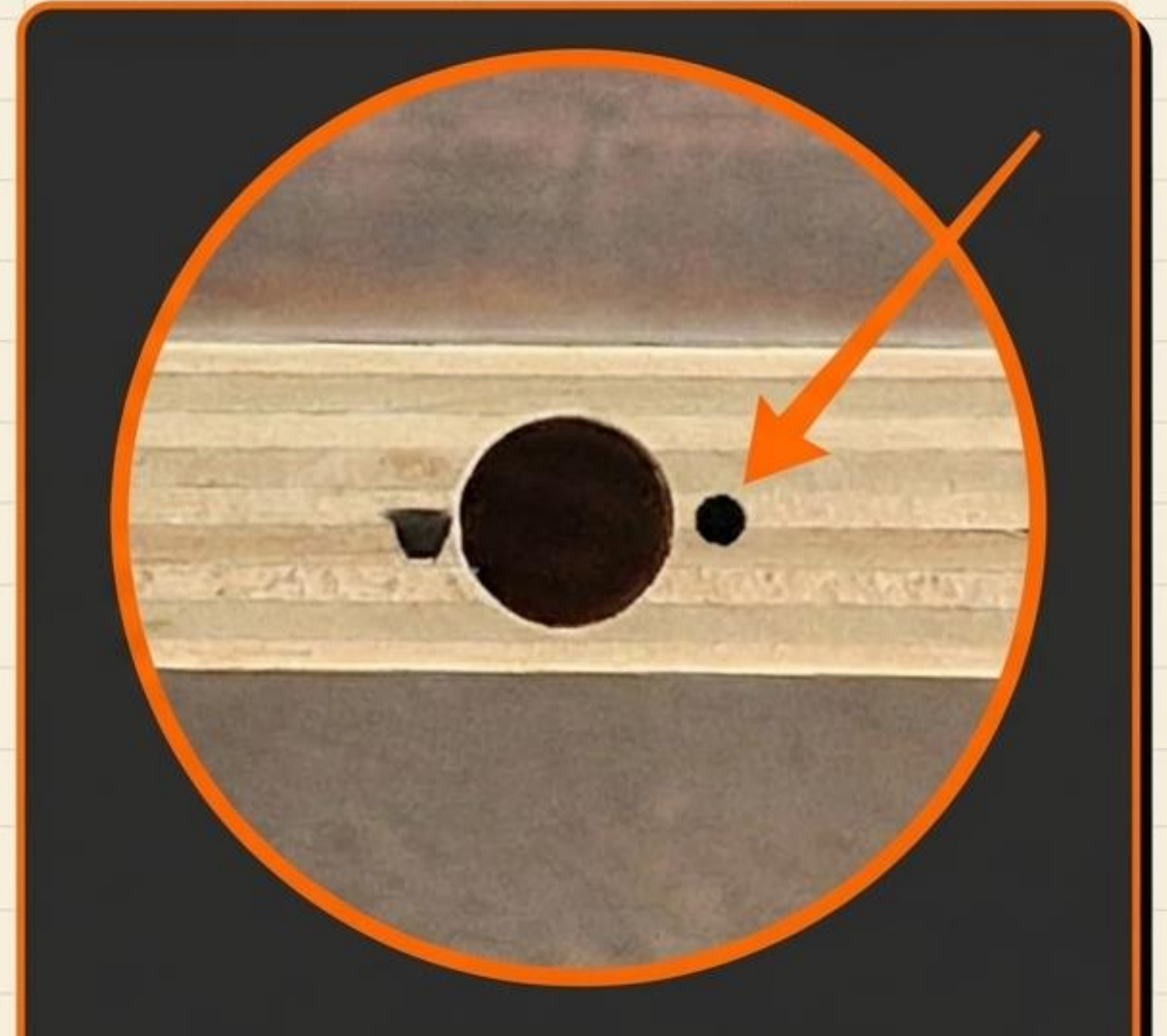

Detalle Macro: Punto de Referencia

Fase 2: Ensamblando el Comedero

Piezas de Madera



Fase 2: Ensamblando el Comedero



1. Haz coincidir los orificios grandes y pequeños en paralelo para alinear los soportes laterales con la base del comedero.



2. Fija las piezas utilizando los Tirafondos Grandes.



Precaución Técnica: Aprieta lo suficiente para fijar las piezas, pero con cuidado de no pasar la rosca de la madera.


Fase 3: El Habitáculo Principal

Piezas de Madera



Fase 3: El Habitáculo Principal

1. Haz coincidir los orificios grandes y pequeños en paralelo para alinear los soportes laterales

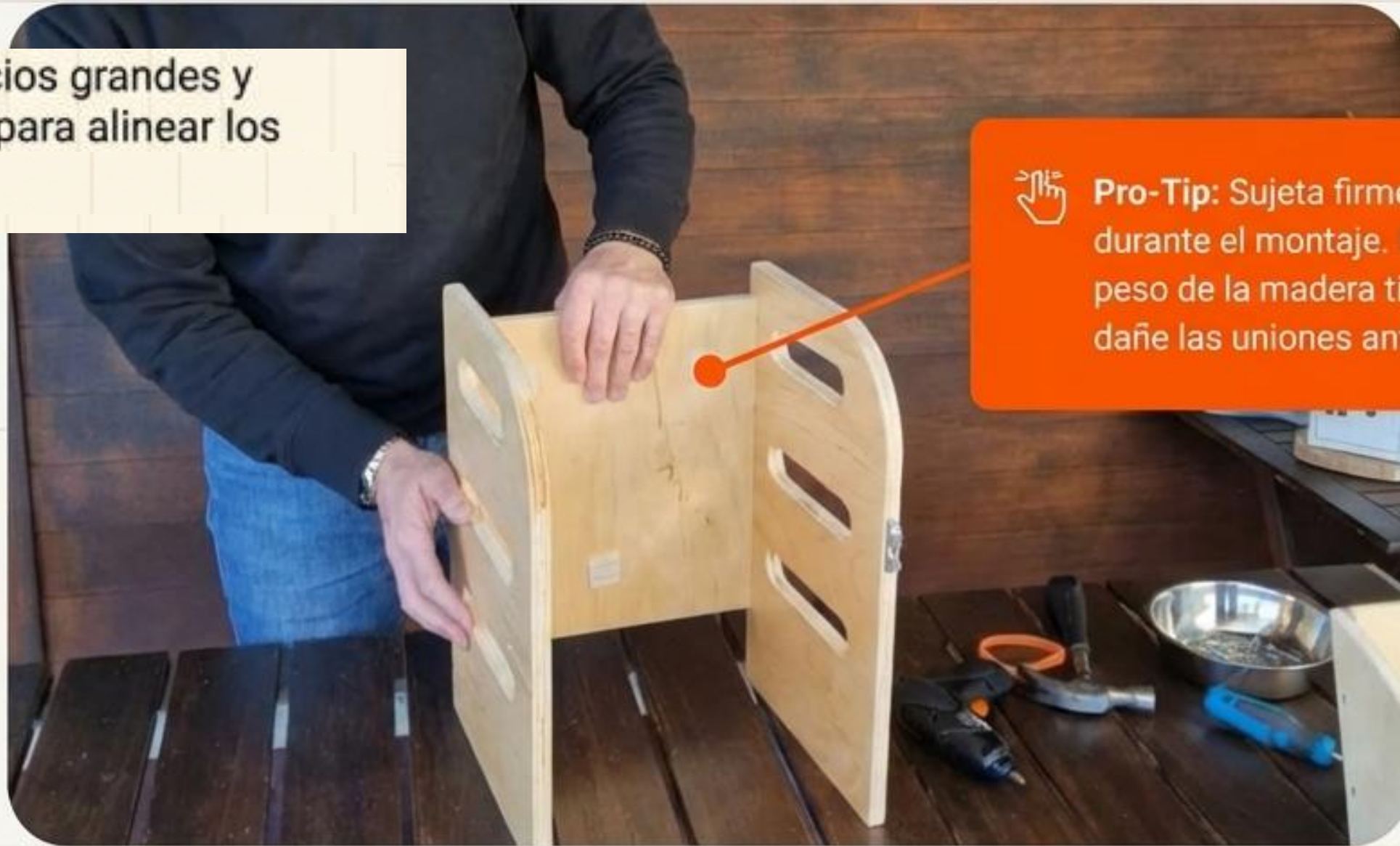

Pro-Tip: Sujeta firmemente las piezas durante el montaje. Evita que el propio peso de la madera tire hacia abajo y dañe las uniones antes de atornillarlas.

Une las dos piezas laterales con el panel de respaldo. Utiliza nuevamente los Tirafondos Grandes.



Fase 4: Estabilidad y Base

Piezas de Madera



Fase 4: Estabilidad y Base



Voltea el habitáculo y haz coincidir los agujeros de la base con la estructura superior.

Fase 5: Bisagras y Ajuste Base



¡Cambio de Herramienta!
Usa el destornillador manual para mayor control sobre la presión.



Fija las bisagras con los Tirafondos Medios. Presta atención a la orientación.



Fase 6: Colocación de la Puerta

Piezas de Madera



Fase 6: Colocación de la Puerta




Encaja la puerta en las bisagras del habitáculo principal.



Bloqueo de Seguridad

Introduce los Pasadores metálicos por los orificios de la bisagra.
Asegúrate de que la cabeza plana del pasador quede hacia arriba.

Fase 7: Mecanismo de Cierre

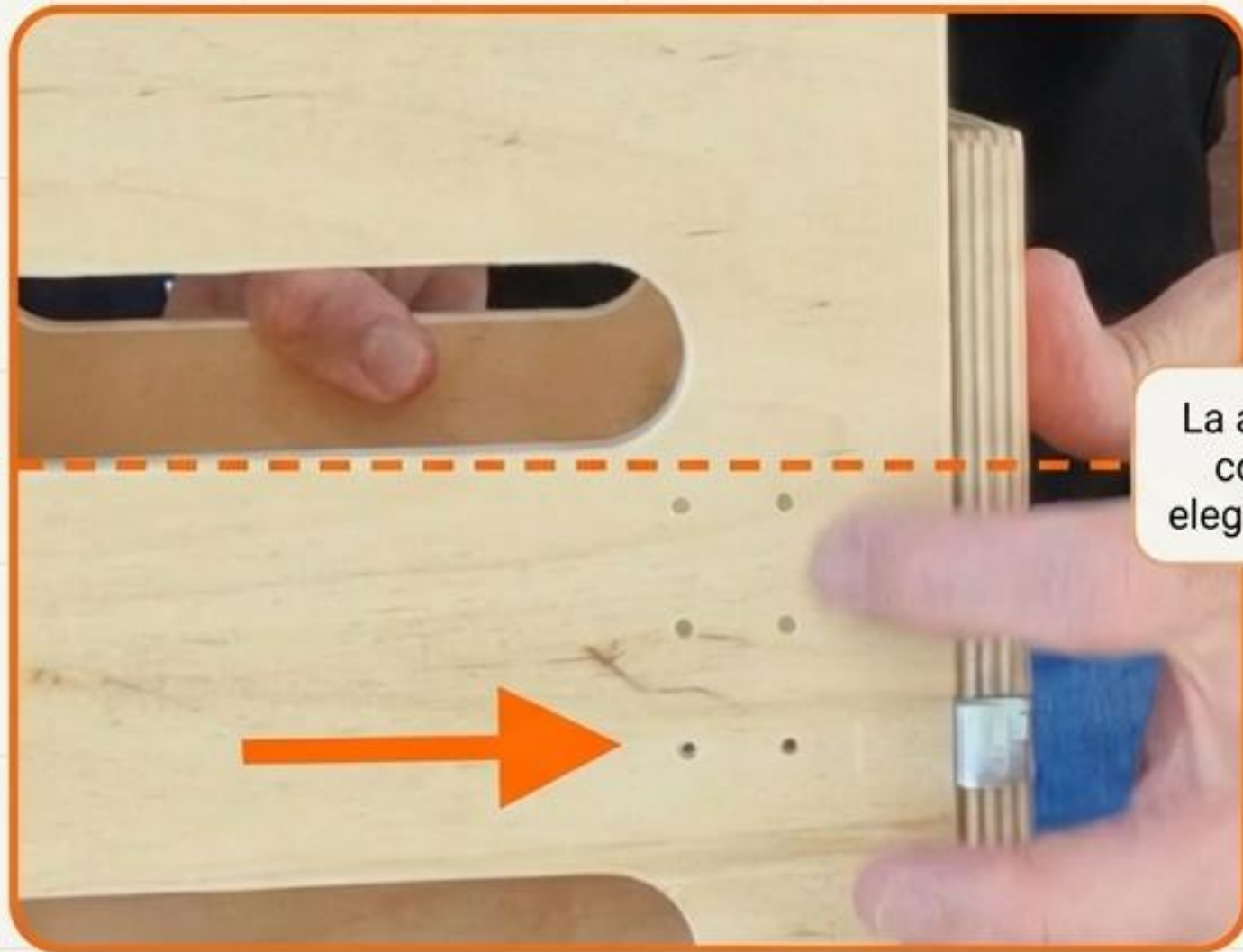

La altura del cierre debe coincidir con el nivel elegido para las bisagras.



Instala el cierre de la puerta utilizando los Tirafondos Pequeños (con destornillador manual).

Fase 8: Sistema Regulador de Altura



- 1 Tornillo (en el comedero) → 2 Carril de la puerta → 3 Arandela → 4 Mariposa

Instrucción

Haz coincidir el carril de la puerta delantera con el tornillo del comedero. Coloca la arandela y enrosca la mariposa firmemente.

✓ Desplazamiento Lateral de Seguridad

Aunque la mariposa esté apretada, el sistema permite un ligero movimiento para evitar el volcado de la silla.

Fase 9: Confort y Acabados



Coloca los acolchados del asiento y del respaldo. Se fijan fácilmente presionando los velcros contra la madera.



Inserta el cazo comedero de acero inoxidable en la abertura superior.



Revisa que todos los componentes estén seguros y estables antes de su uso.

Listo para cuidar. Listo para vivir.

El montaje está completo. Has dado un paso vital para mejorar la salud y digestión de tu perro frente al megaesófago.

Suscríbete a nuestra Newsletter en mega-dog.com para recibir guías y consejos continuos sobre cómo alimentar y cuidar a un perro con Megaesófago.

hello@mega-dog.com | Dark The Dog S.L., San Sebastián.

